


plum Plum Øjenskyllestation

Øjenskyllestation

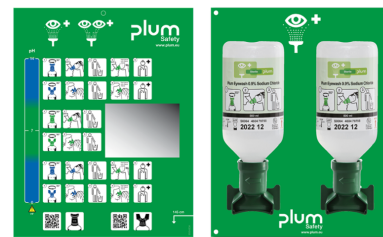

Væghængt øjenskyllestation i hårdfør plast til den lette og hurtige hjælp ved øjenulykker.
Indeholder 2 x 500 ml Plum Eyewash

Anvendelsesområde	Øjenskyll til at skylle fremmedlegemer ud af øjet.			
Produktegenskaber	<p>Uanset set årsagen skal det som oftest gå stærkt, når du får noget i øjet. Derfor skal beredskabet være på plads og være let tilgængeligt på arbejdspladsen.</p> <p>Sortimentet består af øjenskyllestationer med enten 1 eller 2 flasker Plum Øjenskyll. Til hver øjenskyllestation medfølger en guide til korrekt anvendelse.</p> <p>Indeholder 2 x 500 ml. Plum Eyewash og kan genopfyldes med varenr: 4604.</p>			
Brugsanvisning	Det er vigtigt, at øjenskyllvæsken altid rammer øjet i en blød og jævn stråle. Er skaden opstået på begge øjne samtidig, så anvend om muligt en DUO løsning, der kan skylle begge øjne på én gang.			
Bemærkning	Det anbefales at søge læge ved alle typer øjenskader. Dog bør du altid umiddelbart efter pådragelse af en øjenskade bruge øjenskyll eller fosfatbuffer (pH Neutral) afhængigt af skadens omfang. Hav altid ekstra flasker inden for rækkevidde, så du kan fortsætte med at skylle øjet under transport til læge eller skadestue.			
Produktionsland	DANMARK			
Forpackningsstørrelse / Varenummer	Salgsenhed	Varenummer	GTIN	Forpakning
	1 x 1 stk	4694	5715205469419	Plum Øjenskyllestation



Øvrig information

Tjek den senest opdaterede version af brochuren på vores hjemmeside www.kiilto.dk eller send en mail til kundeservice på info.dk@kiilto.com.